


FINGERTEJJP

Fungerar direkt från rullen - designad för att lätt och smidigt kunna rullas upp utan att fastna och trassla till sig.

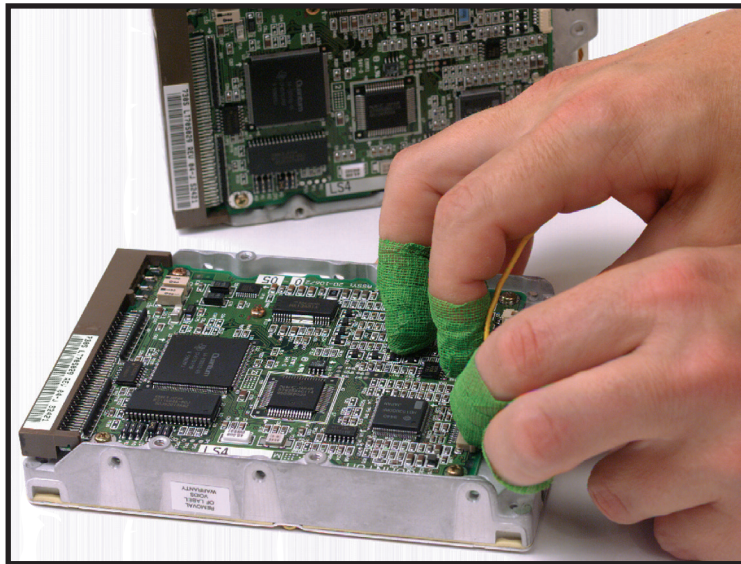

• **SJÄLVHÄFTANDE UTAN TILLSATSER** - Med bara ett lätt tryck fäster skyddstejpen ögonblickligen. Lager på lager kan snabbt viras runt finger eller knoge. Allt efter vilket skydd du behöver. Fäststyrkan ökar vid frekvent användning. Den fysiska aktiviteten behöver inte begränsas.

• **BEKVÄM OCH ANVÄNDARTÄLIG** - Porer i materialet gör det luftigt och bekvämt att använda. Sitter fast och glider eller lossnar inte.

• **HELT VATTENTÄLIG** - Fästet löses inte upp av svett, tvätt- eller tvålösningar, bad eller nedsänkning i tvättmedelslösningar.

• **ENKEL ATT TA BORT** - Klipp bara igenom bandaget och lyft bort tejpen, utan att hud eller hår följer med. Inga rester efter tejpen som kräver rengöringsvätskor.


Material: Bomull och naturgummi

Artikelnr: 059500058


Innehåll: 16 rlr/påse, 19 mm x 27 m

GÖR EN FINGERTUTA SÅ HÄR:

1. Vira om änden av fingret en bra bit bortom fingertoppen.

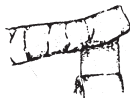

2. Försegla den förlängda änden genom att trycka ihop som visas.

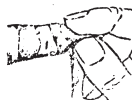

3. Vik tillbaka överskottet över änden av fingret och vik ner.



4. Avsluta med att vira ytterligare ett eller två varv runt fingret.

